

# Globacid® AF med

**Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni niewinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie alkoholu**

- Nie zawiera QAV, pochodnych fenolu, aldehydów
- Nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach
- Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Krótki czas działania
- Może być stosowany na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych

## KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIIA, CE 0537  
PRODUKT BIOBÓJCZY – POZWOLENIE NR 8353/21

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat Globacid® AF med jest przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu w tym powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością i produktami spożywczymi.



**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.  
Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.**

**Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem środków ostrożności.  
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.**

Medi-Pro Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa ☎ +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl  
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



ISO 9001

LL-C (Certification)



ISO 13485

LL-C (Certification)

## SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 16615	<b>Bakteriobójczy</b> (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	60 sek.
EN 16615	<b>Drożdżakobójczy</b> (C. albicans)	60 sek.
EN 13727	<b>Bakteriobójczy</b> (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	60 sek.
EN 13624	<b>Grzybobójczy</b> (C. albicans, A. brasiliensis)	60 sek.
EN 17387	<b>Grzybobójczy</b> (A. brasiliensis)	3 min.
EN 17387	<b>Drożdżakobójczy</b> (C. albicans)	60 sek.
EN 17387	<b>Bakteriobójczy</b> (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	3 min.
EN 13697	<b>Bakteriobójczy</b> (E. hirae)	60 sek.
EN 13697	<b>Drożdżakobójczy</b> (C. albicans)	60 sek.
EN 14348	<b>Prątkobójczy</b> (M. terrae)	30 sek.
EN 14348	<b>Prątkobójczy</b> (M. terrae, M. avium)	60 sek.
EN 14563	<b>Prątkobójczy</b> (M. terrae, M. avium)	60 sek.
EN 14476	<b>Wirusobójczy</b> (Herpes, SARS-CoV-2, Vaccinia, Polyoma SV 40, Adeno)	30 sek.
DVV/RKI	<b>Wirusobójczy</b> (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, H5N1, H1N1)	30 sek.
EN 14476	<b>Wirusobójczy</b> (Polio, Noro, Rota)	60 sek.
EN 16777	<b>Wirusobójczy</b> (Noro, Adeno, Vaccinia)	60 sek.

## SKŁAD

Etanol 15g, Propan-2-ol 60g.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego.
2. Produkt w formie spray'u. Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
3. Nanieść preparat równomiernie na dezynfekowaną powierzchnię z odległości 30 cm za pomocą aplikatora lub za pomocą suchej chusteczki.
4. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia efektu bójczego.
5. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.

## OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Butelka ze spryskiwaczem	NOVA104-1MED	1000 ml	12	4743239001528
Butelka flip-cap	NOVA104-1MED-FC	1000 ml	12	4743239024763
Kanister	NOVA104-5MED	5000 ml	3	4743239012395

## PRODUCENT

Goodpoint Chemicals OÜ  
Urda tee 2/1, Jälgimäe, SAKU VALD /  
HARJUMAA / ESTONIA

## DYSTRYBUTOR

Medi-Pro Sp. z o.o.  
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa  
+48 22 811 03 22,  
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl  
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

