

Detro® Enzym

Wieloenzymatyczny preparat do mycia narzędzi medycznych, endoskopów oraz wyrobów medycznych

- Na bazie 4 różnych enzymów
- Niskie stężenie użytkowe, wydajny koncentrat
- Wysoka kompatybilność materiałowa
- Do stosowania manualnego oraz w myjkach
- Krótki czas działania

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. I

PRZEWDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat Detro® Enzym przeznaczony jest do mycia narzędzi medycznych, w tym endoskopów oraz wyrobów medycznych. Zalecany do stosowania w procesach manualnych oraz maszynowych, zarówno w myjkach półautomatycznych, automatycznych oraz ultradźwiękowych. Preparat posiada szeroką kompatybilność materiałową z wyrobami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, polistyrenem, PVC, polikarbonem, ABS, silikonem, gumą, szkłem, porcelaną.



**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.**

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



ISO 9001

LL-C (Certification)



ISO 13485

LL-C (Certification)

SKŁAD

Enzymy (amylaza, proteaza, lipaza, celulaza), Czwartorzędowe związki amoniowe, Glikol, Niejonowe substancje powierzchniowo czynne, Inhibitory korozji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Produkt do użytku profesjonalnego.
2. Koncentrat należy stosować w 0,5% roztworach roboczych.
3. Do zamkniętego pojemnika z czystą wodą dodać koncentrat Detro® Enzym.
4. Dla uzyskania 1L roztworu roboczego o stężeniu użytkowym 0,5% dodać 5 ml koncentratu do 995 ml wody.
5. Myte wyroby medyczne zanurzyć całkowicie w roztworze Detro® Enzym.
6. Pozostawić w roztworze na czas co najmniej 5 minut.
7. Przy użyciu w myjniach endoskopowych oraz ultradźwiękowych pozostawić narzędzia w roztworze na czas 5 minut. W zależności do stopnia zabrudzenia można wydłużyć czas mycia max do 15 min.
8. Po umyciu narzędzia wyjąć i opłukać wodą, osuszyć i przekazać do dalszej obróbki.
9. Przygotowany roztwór roboczy zachowuje aktywność 24 godziny.

OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Butelka	S-M.DET.3.0014	2000 ml	6	8680097100566
Kanister	S-M.DET.3.0004	5000 ml	4	8680097100368

PRODUCENT

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mah. Cemal Gürsel Cad. No:8,
34522 Kiraç, 34522 Esenyurt/İstanbul, Turcja

DYSTRYBUTOR

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl

PARTNER STRATEGICZNY

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

