

Detro® Forte

Gotowy do użycia preparat na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) endoskopów oraz termolabilnych wyrobów medycznych

- Aktywność sporobójcza w 15 min
- Przebadany wg normy EN 17126
- Aktywny do 28 dni
- Kontrola aktywności za pomocą pasków testowych

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIB, CE 2195

PRZEWDZIANE ZASTOSOWANIE

Detro® Forte przeznaczony jest do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego, a także innych wyrobów medycznych, które nie mogą być poddane sterylizacji w wysokiej temperaturze. Preparat wykazuje szeroką kompatybilność materiałową z narzędziami chirurgii małoinwazyjnej (MIC), szkłem, tworzywem sztucznym oraz elementami optycznymi. Detro® Forte jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów giętkich oraz ich osprzętem dodatkowym.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 13727+ A2 EN 14561	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	5 min.
EN 13624 EN 14562	Grzybobójczy (C. albicans, A. niger)	5 min.
EN 14348 EN 14563	Prątkobójczy (M. avium, M. terrae)	5 min.
EN 14476+A1	Wirusobójczy (Adeno, Polio, Noro)	5 min.
EN 13704	Sporobójczy (B. subtilis)	15 min.
EN 17126	Sporobójczy (B. cereus, C. difficile R027)	15 min.

SKŁAD

2% aldehyd glutarowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Produkt do użytku profesjonalnego.
2. Do kanistra Detro® Forte dodać dołączoną substancję buforującą. Po dodaniu wstrząsnąć i odczekać 15 minut.
3. Preparat przelać do czystego pojemnika z pokrywą.
4. Następnie umyte, opłukane i osuszone wyroby medyczne zanurzyć całkowicie w roztworze Detro® Forte.
5. Odczekać do uzyskania efektu bójczego- 15 minut.
6. Zdezynfekowane wyroby medyczne wyjąć i opłukać czystą mikrobiologicznie wodą, osuszyć i przekazać do użycia.
7. Roztwór roboczy zachowuje aktywność do 28 dni, możliwość wielokrotnego używania, aktywność roztworu kontrolować przy pomocy pasków testowych zgodnie z instrukcją na opakowaniu pasków.
8. Wymienić roztwór, jeśli pasek testowy nie zabarwia się na kolor wskazujący aktywność.

OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Kanister	S-M.DET.1.0001	5000 ml	4	8680097108081
Paski testowe	S-M.DET.6.0004	25 szt.	1	8680097101112

PRODUCENT

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mah. Cemal Gürsel Cad. No:8,
34522 Kiraç, 34522 Esenyurt/İstanbul, Turcja

DYSTRYBUTOR

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

